

Áreas recomendadas para colocar el Arete Electrónico




Limpiar previamente la zona donde se colocará el arete. Revise las instrucciones de aplicación.

IMPORTANTE: PRECAUCIÓN, tener un “espacio libre” es crítico para una buena cicatrización y retención del arete. Revise que el arete no quede muy apretado después de colocarlo, dejando un espacio libre entre el arete electrónico y la oreja.

PARA BOVINOS


1. El Arete Electrónico puede ser colocado a mediación de la oreja entre los 2 cartílagos cerca de la cabeza.
2. Utilizando la pinza para aplicar el arete electrónico, debe colocar la parte hembra del Arete en la parte interna de la oreja. Tenga en cuenta que la zona es más gruesa en esta parte de la oreja. La aplicación puede resultar un poco mas difícil que un arete visual

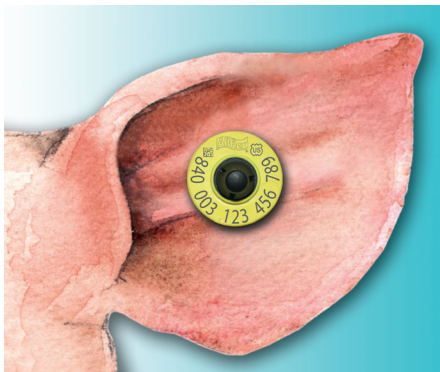

PARA LOS CERDOS

1. Coloque el Arete Electrónico en medio o en la parte mas gruesa de la oreja.
2. El conector macho del arete se coloca en la parte externa de la oreja y la parte hembra debe de ir en la zona interna de la oreja. Para una mejor retención del arete, el macho deberá estar al ras del lado posterior de la oreja.

IMPORTANTE: La colocación puede variar según el tamaño de la oreja o la raza del ganado.

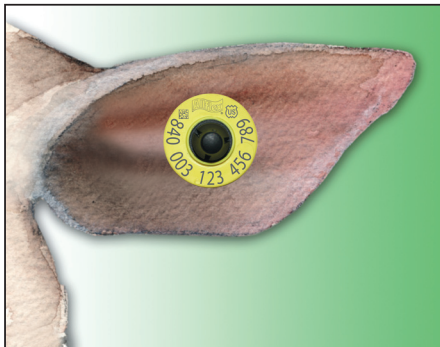

PARA OVEJAS

1. Coloque el Arete Electrónico entre los cartílagos, cerca del primer cuarto de la oreja (cerca de la cabeza).
2. La parte hembra del arete deberá ser colocada en la zona interior de la oreja.