

Animal Intelligence, for Life™



EQUIPO NECESARIO

Para tomar una muestra del tejido usando la Pinza Allflex para Muestras de Tejido, se requiere lo siguiente:

1. Pinzas para muestras Allflex
2. Unidad Recolectora para Muestras de Tejido
 - Los animales deberán estar sujetos durante la toma de la muestra (por ejemplo en una manga o prensa)



Todas las Unidades para Muestras de Tejido deben almacenarse a temperatura ambiente, fuera de la luz solar directa, antes de usarlo. Se debe tener cuidado de no exponer el producto a temperaturas externas de calor o frío antes del muestreo.

COMO UTILIZAR LAS PINZAS PARA MUESTRAS DE TEJIDO ALLFLEX



A. CARGAR LA PINZA PARA MUESTRAS

① Retire la unidad de recolección de su empaque. La unidad debe estar ensamblada como una sola pieza, tal como se muestra; es posible que tenga que ensamblar la unidad antes de colocarla en la pinza.

② Asegúrese este abierto el cilindro retenedor en las pinzas. Si está cerrado, gire el cilindro hasta que quede abierto.



③ Inserte la Unidad Recolectora de Muestras con la punta para perforar como se muestra. Gire el cilindro para fijar la unidad en las pinzas.

④ Apriete las manijas del aplicador, guiando la punta de la TSU en su lugar si es necesario. Usted sentirá una acción de "Bloqueo" si esta colocada correctamente. El perno de la pistola descansará contra el cortador de metal blanco cuando esté totalmente asentado.



⑤ Suelte las manijas. Retire el clip del plástico rojo empujándolo hacia abajo. **EL METAL ES MUY FILOSO, TENGA CUIDADO DE NO LASTIMARSE SU DEDO.**

⑥ El aplicador está ahora cargado y listo para tomar la muestra. Todas las piezas son para un solo uso; No reutilice los cortadores de metal.



B. RECOLECTAR LA MUESTRA

① Asegúrese de que la pinza este cargada con una Unidad para Muestras nueva (si es una unidad usada podrá ver una marca color rojo)




Agujero no usado



Agujero usado

② Deslice las pinzas en la oreja, y coloque la punta de metal aproximadamente a 1 pulgada del borde de la oreja, cuidando que no se dañe alguna vena.

③ Apriete las pinzas para tomar la muestra y liberar la oreja. Trate de hacer esto en un solo movimiento rápido y fluido. Siga la oreja del animal y no los siga en contra.

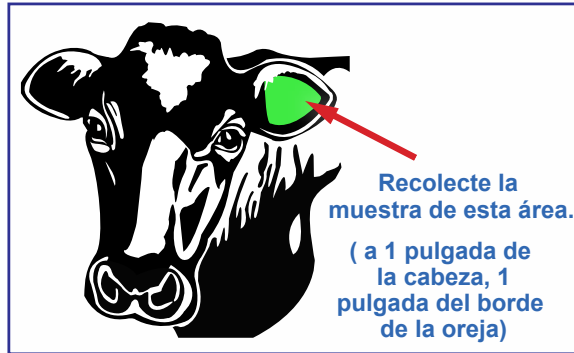

④ Remueva la Unidad de las pinzas y revise que el muestreo haya sido exitoso. De lo contrario, deseche la unidad y tome una nueva muestra con una unidad nueva.

⑤ Remueva la punta de metal de la pinza jalándola hacia atrás. Deséchela en un lugar seguro. **PRECAUCION: EL METAL TIENE MUCHO FILO.**



Quando la muestra de tejido se ha extraído con éxito, se debe tener cuidado de almacenar la muestra a temperatura ambiente y lejos de la luz solar durante un máximo de un año. Recomendamos congelar la muestra después de un año, para almacenamiento a largo plazo.